

Inava DentoFil

Une large gamme de fils dentaires
adaptée à tous les besoins



DentoFil

Chlorhexidine

Fil fin ciré,
Imprégné de chlorhexidine (10%)
Non aromatisé
50 m
épaisseur 0,7g/10m



DentoFil

Black

Fil ciré,
Imprégné de chlorhexidine (10%)
Non aromatisé
50 m
épaisseur 1,1g/10m



DentoFil

Fluor

Ruban fluoré, ciré
Menthe Fraîche
35 m
épaisseur 1,4g/10m



DentoFil

White expanding

Ruban expansible,
Mentholé
25 m
épaisseur 1,37g/10m



Fil dentaire

Exclusivité :
Boitier rechargeable

Inava

TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE

DentoFil

CROSSING Floss

MATÉRIAU COTONNEUX QUI
PERMET D'AUGMENTER LA
SURFACE DE CONTACT ET
RETIRER EFFICACEMENT LA
PLAQUE DENTAIRE

EXTRÉMITÉS FINES ET PLUS
RIGIDES GUIDE-FIL POUR
FACILITER L'INSERTION ET
LE NETTOYAGE DES BRIDGES,
IMPLANTS & AUTOUR DES
APPAREILS ORTHODONTIQUES

APPAREILS
ORTHODONTIQUES

BRIDGES

ESPACES
INTERDENTAIRES
LARGES

IMPLANTS

Menthe Fraîche

Épaisseur
1,37g/10m
Guide fil :
0,38g/10m



FIL NOIR POUR
VISUALISER LE
RETRAIT DE PLAQUE

x30
UTILISATIONS


La brosse à dents n'atteint que 60% de la surface des dents.
À l'aide de la brosette interdentaire et du fil dentaire, adoptez la 100% attitude.



269513

Comment utiliser le CROSSING Floss ?

- 1**
Tirer le fil jusqu'à ce que la partie guide-fil (fine) apparaisse entièrement

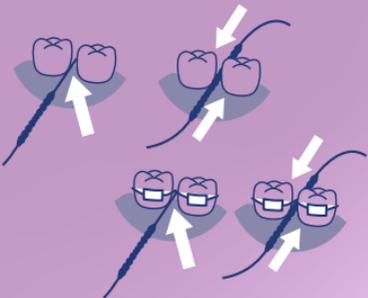

- 2**
Insérer le guide-fil entre les dents (sous le bridge ou entre les brackets de l'appareil orthodontique) puis faites coulisser jusqu'à ce que la partie cotonneuse atteigne l'espace interdentaire (si l'espace est trop fin, étirer le fil pour l'affiner). Faites un mouvement de va et vient pour retirer la plaque dentaire.

- 3**
Jeter le fil après usage.



- 2**
Couper à la moitié de la partie guide-fil (environ 5 cm de part et d'autre)



Comment remplacer la bobine une fois terminée ?



- 1**
Prendre le boîtier et ouvrir le capot.

- 2**
Ouvrir le 2^{ème} compartiment dans lequel se trouve la bobine vide. Ne pas toucher la partie coupe-fil en métal qui peut être coupante.

- 3**
Retirer la bobine vide et insérer la recharge au centre en laissant dépasser un peu de fil.

- 4**
Refermer le boîtier. Le fil dentaire est prêt à être utilisé.

