



ELGYDIUM CLINIC

FABRIQUÉ
EN ITALIE

Cicalium

Favorise la cicatrisation des blessures buccales

Efficacité cliniquement prouvée*

CONSEILS D'UTILISATION

- ☐ **Spray** : pulvériser 3 fois directement sur la zone concernée. Appliquer 3 à 4 fois par jour.
- ☐ **Gel** : appliquer directement sur la zone concernée 3 à 4 fois par jour à l'aide de l'applicateur.
 - Éviter de manger et de boire pendant au moins 1 heure après l'application.
 - Adultes et enfants à partir de 4 ans.



Dispositifs médicaux

Elgydium Clinic Cicalium Spray : ACL : 60 36 373. EAN13 : 3 577 056 017 889

Elgydium Clinic Cicalium Gel : ACL : 60 36 375. EAN13 : 3 577 056 017 896

Spray 15 ml

Gel 8 ml

245128 - Nov 2020

DÉNOMINATION : ELGYDIUM CLINIC Cicalium Spray. DESTINATION : Aide au traitement des aphtes et des lésions buccales pour soulager la douleur et favoriser la cicatrisation. Peut être utilisé chez l'adulte et l'enfant. CARACTÉRISTIQUES : Aqua, PVP, Taurine, Zinc gluconate, PEG-40, Hydrogenated castor oil, sodium saccharin, Pullulan, aroma. CONTRE-INDICATION : Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des ingrédients. DISPOSITIF MÉDICAL : Classe IIa. CE 0476. FABRICANT : BMG Pharma SPA, Viale Restelli 1, 20124 Milan, Italy. Lire attentivement la notice avant utilisation. Non remboursé par la sécurité sociale. Mise à jour : Novembre 2020 - [201103].

DÉNOMINATION : ELGYDIUM CLINIC Cicalium Gel. DESTINATION : Aide au traitement des aphtes et des lésions buccales pour soulager la douleur et favoriser la cicatrisation. Peut être utilisé chez l'adulte et l'enfant. CARACTÉRISTIQUES : Aqua, PVP, Taurine, Xanthan gum, Zinc gluconate, PEG-40, Hydrogenated castor oil, sodium saccharin, aroma. CONTRE-INDICATION : Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des ingrédients. DISPOSITIF MÉDICAL : Classe IIa. CE 0476. FABRICANT : BMG Pharma SPA, Viale Restelli 1, 20124 Milan, Italy. Lire attentivement la notice avant utilisation. Non remboursé par la sécurité sociale. Mise à jour : Novembre 2020 - [201103].

*Étude clinique comprenant 80 patients - 2012.

Pour de plus amples informations, veuillez lire attentivement la notice. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.



ELGYDIUM *CLINIC*

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Xeroleave

Soulage la sécheresse buccale

*Efficacité cliniquement prouvée**

CONSEILS D'UTILISATION

- **3 pulvérisations / application :**
1 sur la joue droite, 1 sur la joue gauche
et 1 sur la langue.
- À utiliser aussi souvent que nécessaire
(dans la limite de 8 applications par jour).




Spray
70 ml

Dispositif médical
Elgydium Clinic Xeroleave Spray :
ACL : 3 401 060 296 681. EAN13 : 3 577 056 017 117

DÉNOMINATION : ELGYDIUM CLINIC Xeroleave SPRAY. DESTINATION : Soulagement de la sécheresse buccale (xérostomie) associée à un manque ou absence de salive (hyposialie ou asialie) d'origine médicamenteuse ou radiothérapeutique et de la sécheresse buccale du sujet âgé. CARACTÉRISTIQUES : Eau purifiée, Glycérol, Povidone, Hydroxystéarate de macrogolglycérol, Extrait de guimauve, Alcool benzylique, Phosphate disodique, Phosphate monopotassique, Copovidone, Sorbate de potassium, Xylitol, Gomme xanthane, Chlorure de potassium. CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL : Classe I. FABRICANT : Pierre Fabre Medical Devices, 29, avenue du Sidobre, 81106 Castres Cedex, France. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Non remboursé par la Sécurité sociale. [Réf. 160302]

*Étude clinique comprenant 24 patients. Rapport interne Pierre Fabre - 2014.

Pour de plus amples informations, veuillez lire attentivement la notice. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.



ELGYDIUM *CLINIC*

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Sensileave

Réduit la sensibilité dentaire

*Efficacité cliniquement prouvée**

CONSEILS D'UTILISATION



Dentifrice :

- 2 à 3 fois par jour en brossage.
- Adultes et enfants à partir de 12 ans.



Gel :

- 2 à 3 fois par jour avec un doigt propre ou à l'aide d'une brosse à dents souple sur les zones sensibles.
- Ne pas rincer.
- À partir de 18 ans.



Programme Sensileave

- 1 - Dentifrice : en brossage 2 à 3 fois par jour.
- 2 - Gel : en application locale 2 à 3 fois par jour.

Dispositif médical - Elgydium Clinic Sensileave :

Dentifrice : ACL : 61 19 497. EAN 13 : 3 577 056 021 107.

Gel : ACL : 3 401 560 237 627 / 626 203 5.

EAN : 3 577 056 016 219 / 3 577 056 024 665.



Dentifrice
50 ml

Gel
30 ml

DÉNOMINATION : Elgydium Clinic Sensileave Dentifrice. **DESTINATION** : Traitement de la douleur causée par l'hypersensibilité dentinaire. **CARACTÉRISTIQUES** : Aqua, Hydrogenated starch hydrolysate, Potassium nitrate, Hydrated silica, Aroma, Cellulose gum, CI 42051, CI 47005, Limonene, Linalool, Nicotinyl alcohol HF, Sodium carbonate, Sodium lauryl sulfate, Sodium saccharin. **CONTRE-INDICATIONS** : Ne pas utiliser avant 12 ans. En l'absence de données, ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante. Intolérance héréditaire au fructose (fructosémie congénitale) du fait de la présence de sorbitol se transformant en fructose. Ne pas appliquer si vous êtes allergique à l'un des composants. **CLASSE DISPOSITIF MÉDICAL** : Classe I. **FABRICANT** : PIERRE FABRE MEDICAL DEVICES, France. Lire attentivement la notice avant utilisation. Non remboursé par la sécurité sociale. [20190703].

DÉNOMINATION : ELGYDIUM CLINIC Sensileave Gel. **DESTINATION** : Traitement de la douleur causée par l'hypersensibilité dentinaire. **CARACTÉRISTIQUES** : Water (aqua), hydrogenated starch hydrolysate, potassium nitrate, silica, flavor (aroma), cellulose gum, CI 42051, CI 47005, limonene, linalool, nicotinyl alcohol HF, sodium carbonate, sodium lauryl sulfate, sodium saccharine. **CONTRE-INDICATION** : Ne pas utiliser avant 18 ans. En l'absence de données ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante. Intolérance héréditaire au fructose (fructosémie congénitale) du fait de la présence du sorbitol se transformant en fructose. **CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL** : Classe I. **FABRICANT** : PIERRE FABRE MEDICAL DEVICES, France. Lire attentivement la notice avant utilisation. Non remboursé par la sécurité sociale. [20190703].

*Étude clinique comprenant 55 patients. Rapport interne Pierre Fabre - 2016.

Pour de plus amples informations, veuillez lire attentivement la notice. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE



ELGYDIUM *CLINIC*

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Protection Erosion

Aide à renforcer l'émail et protéger les dents des attaques acides



*Efficacité cliniquement prouvée**

CONSEILS D'UTILISATION

- 2 à 3 fois par jour après chaque repas.
- Adultes et enfants à partir de 6 ans.



Dentifrice
75 ml

Cosmétique
Elgydium Clinic Protection Erosion :
ACL : 60 89 922. EAN 13 : 3 577 056 019 739

En complément du dentifrice **ELGYDIUM CLINIC Protection Erosion**, nous vous recommandons d'adopter un régime alimentaire équilibré pour une protection quotidienne. Pour ce faire, demandez conseil à votre chirurgien-dentiste. Il vous aidera à identifier et limiter les sources d'acidité à l'origine de l'érosion dentaire.

Conseils d'utilisation : brosser 2 à 3 fois par jour, après chaque repas, de préférence avec une brosse à dents souple. Enfants à partir de 6 ans : appliquer une petite quantité de dentifrice sous la supervision d'un adulte afin de réduire le risque d'ingestion. En cas d'apport de fluorure provenant d'autres sources, consultez un dentiste ou un médecin. Contient du fluorhydrate de nicométhanol (Fluorinol®).

*Étude comportant 28 patients. Rapport interne Pierre Fabre - 2017.