

# ELGYDIUM Fix

CRÈME FIXATIVE POUR PROTHÈSES DENTAIRES

JE RECHERCHE :



- ✓ La **MEILLEURE BARRIÈRE PROTECTRICE** contre les particules alimentaires\*
- ✓ Une formule **HYPOALLERGÉNIQUE**
- ✓ Un goût **NEUTRE** qui n'altère pas le goût des aliments
- ✓ Une formule **SANS ZINC**

**FIXATION FORTE**

- ✓ La **MEILLEURE FIXATION\***
- ✓ Une meilleure résistance aux aliments chauds\*
- ✓ Un goût **FRAIS**
- ✓ Une formule **SANS ZINC**

**FIXATION EXTRA FORTE**



## Format

TUBE DE 45G AVEC CANULE  
POUR UNE APPLICATION PRÉCISE ET HYGIÉNIQUE

\* Parmi la gamme ELGYDIUM Fix.  
ELGYDIUM Fix Fixation Forte et ELGYDIUM Fix Fixation Extra Forte, dispositifs médicaux, sont des crèmes fixatives pour prothèses dentaires. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices. Dispositifs médicaux de classe I. Non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Distributeur : Pierre Fabre Médicament. Février 2022 - [255569].

Pierre Fabre  
**ORAL CARE**

[www.pierrefabre-oralcare.fr](http://www.pierrefabre-oralcare.fr)

# ELGYDIUM Fix

CRÈME FIXATIVE POUR PROTHÈSES DENTAIRES

gamme de fixateurs pour  
prothèses dentaires

adaptée aux besoins  
de vos patients



Photo credits: Getty Images, skymesh

**FIXATION FORTE**

**FIXATION EXTRA FORTE**

**SANS ZINC**

- ✓ **Fixation toute la journée**
- ✓ **Adhérence rapide**

**ELGYDIUM**, complice de chaque sourire.

\* Étude IMAGO décembre 2017, 202 répondants 38 % de recommandation.

Pierre Fabre  
**ORAL CARE**

# ELGYDIUM Fix

CRÈME FIXATIVE POUR PROTHÈSES DENTAIRES

Et si ma prothèse se décolle au cours de la journée ?

Pourquoi utiliser une crème fixative ?

Utiliser une crème fixative permet d'améliorer le confort des porteurs de prothèses dentaires amovibles :

- elle renforce la stabilité de la prothèse
- elle assure un rôle de coussin entre la prothèse et la gencive
- elle forme une barrière protectrice contre l'accumulation des particules alimentaires

ENVIRON **15 %**  
des édentés se font poser  
une prothèse chaque année



Au retrait de la prothèse, il est important d'éliminer les résidus d'adhésif à l'aide d'une brosse à dents adaptée comme **Inava Prothèse**

Conçue pour le nettoyage quotidien des prothèses amovibles.  
Une solution spécifique sur mesure pour vos patients.

Efficace grâce à la double implantation concave/convexe de ses brins. Les brins disposés à l'extrémité permettent de nettoyer les crochets ou les zones difficiles d'accès.

Une combinaison d'agents adhésifs pour garantir l'adhésion de la prothèse sur la muqueuse



Agents adhésifs EFFICACES  
Gantrez™, CMC (gomme de cellulose)  
+ PVP (pour la référence  
FIXATION FORTE)



Grâce à sa formule hydrophile, la crème adhère à la gencive, assurant un rôle de coussin entre la prothèse et la gencive. Elle forme une barrière protectrice contre l'accumulation des aliments, ce qui préserve l'hygiène de la bouche et des dents.



Comment utiliser ELGYDIUM FIX ?

- .1. NETTOYER & SÉCHER**  
soigneusement la prothèse dentaire amovible
- .2. DÉPOSER**  
une petite quantité de crème en formant de petites bandes (2 à 4)
- .3. POSITIONNER**  
correctement la prothèse sur la gencive et appuyer fermement pendant quelques secondes
- .4. Pour ENLEVER**  
la prothèse, rincez votre bouche avec de l'eau tiède, effectuez de légers mouvements de va-et-vient et retirez lentement la prothèse.

Au retrait de la prothèse, il est important d'éliminer les résidus d'adhésif à l'aide d'une brosse à dents adaptée comme **Inava Prothèse**

EN CAS D'INCONFORT PERSISTANT  
OU EN CAS DE DOUTE,  
CONTACTER UN CHIRURGIEN DENTISTE